
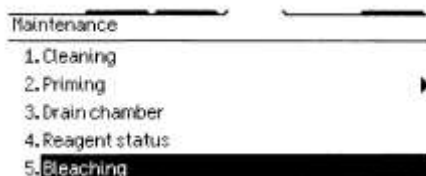


VetScan[®] HM2 Hematologický analyzátor

Postup při bělícím čištění

- 1. Příprava 0,5 % bělícího (čistícího) roztoku s destilovanou vodou.**
(např. 100 destilované vody + 5 ml konc. kyseliny chlorovodíkové)
POZOR! Při přípravě postupujte tak, že do předem odměřené destilované vody přidáte 5 ml konc. kyseliny chlorovodíkové nejlépe po kapkách, skleněnou pipetou opatřenou na horním konci ochranným nástavcem na pipetování.
- 2. Stiskněte tlačítko funkcí:** vyberte v nabídce č. 1 **Maintenance** (údržba),
poté zvolte funkci č. 5 **Bleaching** (čištění),
stiskněte **OK** pro pokračování.

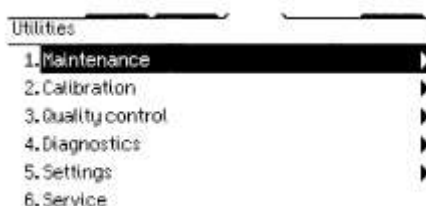

3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce:

Message 5012/1086

Remove reagent tubing at reagent inputs (Diluent, Lyse, Rinse and Cleaner). Leave waste connected.

Message 5014/1086

Connect min. 100 ml bleach solution to reagent inputs using cleaning tube kit.

Message 5003/1086

Remove cleaning tube kit. Keep reagent inputs free. Leave waste connected.

Message 5002/1086

Connect min. 100 ml distilled water to reagent inputs using cleaning tube kit.

Message 5003/1086

Remove cleaning tube kit. Keep reagent inputs free. Leave waste connected.

Reconnect HM2 Reagent Pack

Install a NEW reagent pack. You can also reconnect OLD reagents or you can STOP (turn off) the instrument. Please select action. NEW OLD STOP

Zpráva č. 5012/1086

Odpojte hadice od roztoků ředícího (Diluent), lyzačního (Lyse) proplachovacího (Rinse) a čistícího (Cleaning). Ponechte připojenou hadičku k nádobě na odpad (Waste). Stiskněte OK pro pokračování.

Zpráva č. 5014/1086

Připojte čistící hadici k výstupům pro činidla na zadní straně přístroje. Volný konec k hadice ponořte do min. 100 ml čistícího bělicího roztoku. Stiskněte OK pro pokračování.

Zpráva č. 5003/1086

Odpojte čistící hadici. Reagencie nechte odpojené. Ponechte připojenou hadičku k nádobě na odpad. Na displeji stiskněte OK.

Zpráva č. 5002/1086


Připojte čistící hadici k výstupům pro činidla. Nechte připojen odpad. Volný konec hadice ponořte min. do 100 ml destilované vody. Stiskněte OK.

Zpráva č. 5003/1086

Odpojte čistící hadici a ponechte volné výstupy pro činidla. Odpad ponechte napojený. Stiskněte OK.

Proces čištění je ukončen, nastává připojení reagencí

Připojte hadice reagencí k výstupům pro činidla vzadu na HM2. Vyberte jednu z možností zobrazených na displeji „NEW“ v případě připojení nového balení činidel, „OLD“ pro použité reagencie, případně „STOP“, pokud se bude HM2 převážet. Objem reagencí se automaticky pomocí softwaru ustaví ve správném uživatelském systému.

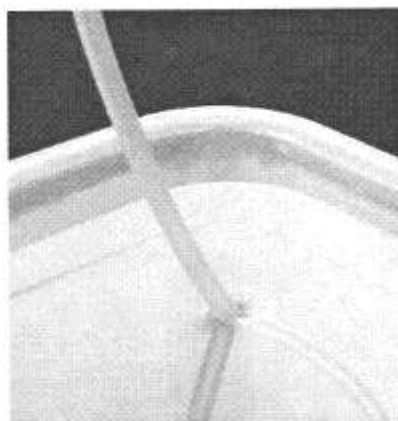

Čistící a bělicí hadice:

Pozn.: Dlouhý konec hadice se ponořuje nejprve do čistícího roztoku a pak do destilované vody. Krátké konce se napojují a odpojují k činidlům označeným: (Rinse, Lyse, Cleaning, Diluent).