

VetScan[®] HM2 Hematologický analyzátor

Doplňující informace

Odběr vzorku a zacházení se vzorkem:

- Přesvědčte se, zda Vaše EDTA zkumavky nemají prošlou záruční lhůtu.
- Odběr proveďte do čisté injekční stříkačky a krev bezprostředně po odběru přeneste do EDTA zkumavky. Zkumavka musí být naplněna alespoň do poloviny. Opatrně promíchejte obsah zkumavky obracením 10-15x.
- Zkontrolujte pomocí špejle každou zkumavku, zda vzorek neobsahuje krevní sraženiny. Pokud je přítomna sraženina nebo fibrinová vlákna, odeberte nový vzorek pro zajištění optimální správnosti výsledku. Pokud není možné odebrat nový vzorek, odstraňte veškeré sraženiny a fibrinová vlákna před nasazením vzorku.
- Pokud existuje prodleva mezi odběrem a testováním, vzorky mohou být vloženy do hematologické míchačky a promíchány k zajištění homogenity. Těsně před testováním vzorek pečlivě promíchejte znovu k zajištění optimální správnosti. K zajištění co nejlepších výsledků je třeba vzorek zpracovat mezi 5. a 15. minutou po odběru.

Poznámka: Mikrozkušavky promíchejte pouze ručně, ne pomocí míchačky. Shluknutí (agregaci) destiček lze minimalizovat pečlivým odběrem vzorků do EDTA a promícháním na vortexu do 30 vteřin před testováním.