


VetScan® Přístroj na stanovení parametrů krevní srážlivosti **VSpro**

Zkrácená příručka k obsluze

1. Do přístroje zapojíte konektor transformátoru a do transformátoru přívodní šňůru. Zástrčku přívodní šňůry zapojíte do zásuvky. Na předním panelu přístroje (vpravo pod obrazovkou) stisknete silným stiskem tlačítko, až se rozsvítí modře.
2. Stiskněte nápis „Analyze“ na menu obrazovky.

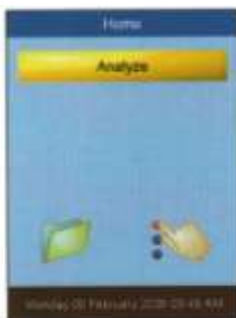

3. Jakmile se objeví na obrazovce nápis: **Please insert new cartridge**, zasuňte novou testovací destičku do přístroje do příslušného otvoru pod obrazovkou. Destičku zasuňte tak, aby jamka ve tvaru kapky byla vysunuta ven.



4. Na obrazovce se objeví nápis: Cartridge Code a klávesnice s čísly. Vyznačte pomocí čísel obrazovky kód testu (je napsaný dole na obalu u označení).

CODE

Po zapsání kódu stiskněte „DONE“ na dolním okraji obrazovky.




5. Na obrazovce se objeví: Confirm Citrate (potvrdit, že krev byla odebrána do citrátu) - zkumavky s modrým víčkem.

Stiskněte: „Confirm“ v dolním rohu obrazovky.



6. Na obrazovce se objeví: Patient ID:
Sample ID:

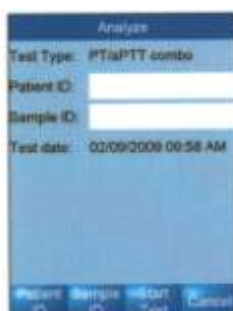

Stiskněte v dolním rohu obrazovky nápis „Patient ID“

Na obrazovce se objeví abeceda: identifikace podle jména:

Stisknutím „123“ se objeví číslice k napsání identifikace.

Stiskem „DONE“ se dostanete zpět k možnosti identifikace vzorku (Sample ID).

Stiskem „123“ můžete zadat číslo pacienta, datum narození apod.

Potom stiskněte „Start Test“ na dolním konci obrazovky.

7. Na obrazovce objeví: **Add blood and wait.**

Kapátkem, které je uloženo v obalu s destičkou, naplníte otvor ve tvaru kapky plný krví.



8. Na obrazovce se objeví: Test in progress, nastává inkubace a až se objeví naměřené výsledky:



PT: 14 -19 s (u psa)
aPTT: 75 -105 s (u psa)

9. **Please remove cartridge** (Prosím, vyjměte destičku ven).

