

CardioDetect[®] lab

Zkrácená příručka k obsluze

Použitelnost testu: Rychlý test CardioDetect by měl být aplikován, pokud je suspektní diagnóza akutního infarktu myokardu (AIM). Test detekuje kardiální marker h-FABP v časně fázi infarktu myokardu.

Odečet: V pozici „C“ se musí vždy objevit kontrolní linie. Jinak test není hodnotitelný. V poloze „T“ se objeví linie v případě, že koncentrace h-FABP je zvýšená.

Provedení testu: Aplikujte 100 µl (3 - 4 kapky) plné krve, séra nebo plasmy Odečtěte za 15 (nejpozději za 20 minut). Vybarví se jedna nebo 2 linie.

Diferenciálně diagnostická kritéria: Ledvinová insuficience, intenzivní fyzická cvičení v průběhu posledních 24 hodin, plicní embolie, chronické srdeční selhání.

