

Provedení: Actim® 1ngeni
Kat. číslo: 19100AC

Vyrábí: Oy Medix Biochemica Ab
Kauniainen, Finsko
CE

Distribuuje: inlab medical s.r.o. **ČSN EN ISO 9001:2001**
Kubelíkova 1779/23, 130 00, Praha 3-Žižkov
Telefon/Fax: (+420) 222721023, 222721025,
222721032
e-mail: inlab@inlab.cz
www.inlab.cz

Určeno pro diagnostické účely *in vitro!*

POSTUP

1. **Zapnutí:** Přidržte přepínač do chvíle, než uslyšíte zvukový signál. Posléze se na obrazovce objeví ikona přesýpacích hodin a v dolní části obrazovky se odpočítává čas. Na obrazovce se objeví nápis s názvem přístroje Actim® 1ngeni a přístroj se nastartuje automaticky.
2. Následuje zvukové znamení a přístroj provede Selftest.
3. Objeví se klávesnice a nad ní příkaz: zadejte ID uživatele.
4. Zadejte: **admin** a stiskněte **zelené** zatržení pro potvrzení.
5. Objeví se požadavek: zadejte heslo.
6. Zadejte znovu **admin** a stiskněte **zelené** zatržení.
7. Objeví se 3 kolonky, vyberte jednu z nich a postupujte dle příkazů:
 - a) Test pacienta: zadejte jméno pacienta.
 - b) Test kontroly: vyberte Prom či Partus.
 - c) Test přístroje: vložte kontrolní proužek.

U zadání pacienta se provede vložení štětičky s plodovou vodou do pufru, promíchá se, vloží se testovací proužek do pufru se vzorkem a po té, co vyvztlíná tekutina proužkem k zóně pro vzorek, se proužek vloží do nosiče a pak do přístroje. Přístroj odečítá 5 minutový interval a pak zobrazí výsledek **pozitivní** nebo **negativní**.

