

Rychlý latexový test na antigen COVID-19.

Vyrábí: Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd.
NO.519, XingGuo RD,
Yuang Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou, Zhejiang,
China, 311188
CE

Distribuje: inlab medical s.r.o.
Kostelec u Křížků 275, 251 68
Telefon/Fax: (+420) 222721023, 222721025,
222721032
e-mail: inlab@inlab.cz
www.inlab.cz

Zplnomocněný zástupce EU: Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,
le Verd, 2595AA
The Haque, The Netherlands
CE

Určeno pro diagnostické účely *in vitro!*


POSTUP

Biologický materiál: sliny, hlen, stolice.
Optimální doba odběru: ráno, před čištěním zubů, jídlem a
pitím.



1. Vyjměte z krabice čistými rukama pohárek (sáček ze kterého pohárek vytvoříte).
2. Do pohárku odkašlete nebo plivněte sliny (pro dostatečné množství, je třeba plivnout několikrát nebo nejlépe vykloktat).
3. Odšroubujte fialový uzávěr z kapací lahvičky.
4. Naberte sliny do plastového kapátka po vyznačenou vodorovnou linku na kapátku.
5. Kápněte sliny do otevřené lahvičky s fialovým uzávěrem a lahvičku uzavřete.
6. Promíchejte tekutinu v lahvičce se slinami (obracením, ne třepáním).
7. Sejměte z lahvičky průhledný kryt a odlomte fialový kryt. Nyní máte kapací lahvičku.
8. Vyjměte z fóliového obalu kazetu a položte na vodorovnou podložku.
9. Do jamky na kazetě označené S kápněte 3 kapky z kapací lahvičky. Pozor, jamka musí být plná! Zkontrolujte, zda se u dolního okraje obdélníkové jamky objevuje tekutina, pokud ne přikápněte vzorek.
10. Vyčkejte 15 minut, nejpozději však 20 minut na výsledek.

VYHODNOCENÍ

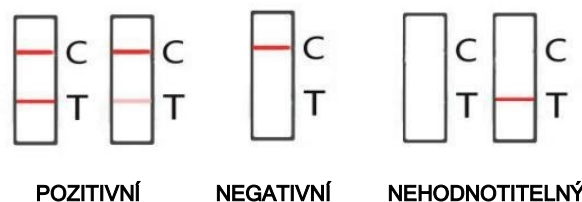

Dvě fialové linie (C i T) pozitivní test.
Jedna pozitivní linie (C) negativní test.
Jedna linie (T) bez linie (C) nebo žádná linie: nehodnotitelný test (většinou málo vzorku).