
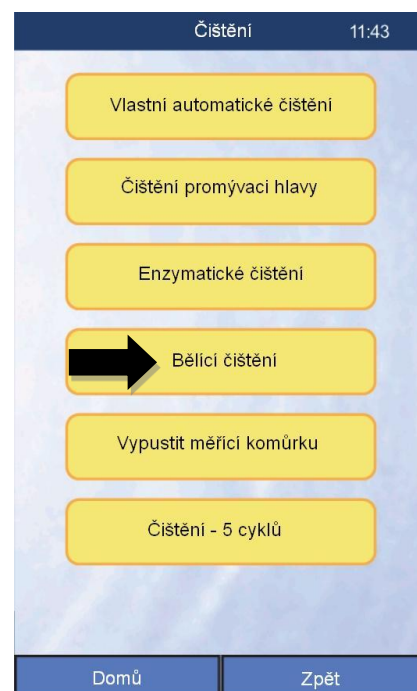


VetScanTM HM5

Veterinární hematologický analyzátor

Bělicí čištění

- K bělicímu čištění hematologického analyzátoru Abaxis VetScan HM5 si připravte:
 - Minimálně 100 ml destilované vody.
 - Čistící hadičku dodávanou s analyzátozem.
 - Minimálně 100 ml čistícího roztoku 5 % kyseliny chlorovodíkové (5 % HCL). Kyselinu objednávejte spolu s reagensiemi. Běžně dodávané balení vydrží asi na čtyři cykly bělicího čištění.
- Na displeji analyzátoru stiskněte ikonu údržby „Údržba“.
- Stiskněte tlačítko „Čištění“.
- V menu čištění stiskněte tlačítko „Bělicí čištění“ a následně stiskem tlačítka „OK“ zahájíte bělicí čištění.

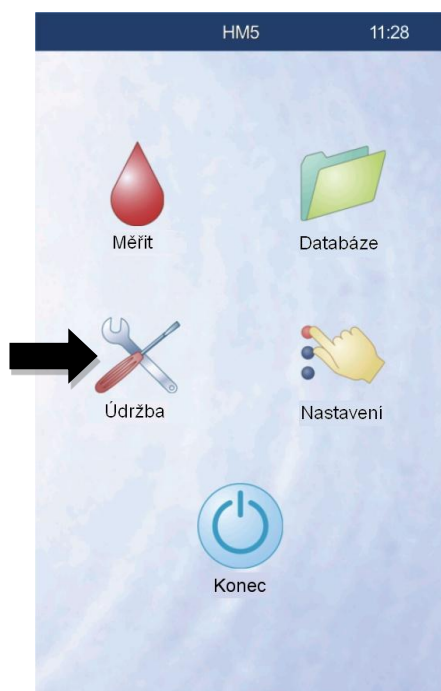

- Po výzvě odpojte hadičky reagensí od analyzátoru (Diluent, Lyse, Lyse 2, Rinse and Cleaner). **Červenou hadičku odpadu (Waste) nechte po celou dobu čištění připojenou.**
- Připojte čistící hadičku k analyzátoru. Pořadí nerozhoduje. Stiskem tlačítka „OK“ na displeji pokračujte v procesu čištění.



7. Po výzvě ponořte volný konec čistící hadičky do minimálně 100 ml bělicího roztoku 5 % kyseliny chlorovodíkové (5 % HCL). Stiskem tlačítka „OK“ na displeji pokračujte v procesu čištění.
8. Po výzvě vyndejte volný konec čistící hadičky z čistícího roztoku. Stiskem tlačítka „OK“ na displeji pokračujte v procesu čištění.
9. Po výzvě ponořte volný konec čistící hadičky do minimálně 100 ml destilované vody. Stiskem tlačítka „OK“ na displeji pokračujte v procesu čištění.
10. Po výzvě vyndejte volný konec čistící hadičky z destilované vody. Stiskem tlačítka „OK“ na displeji pokračujte v procesu čištění.
11. Následně odpojte čistící hadičku. V případě instalace nových reagentů přendejte víčka s vnitřními hadičkami ze starých reagentů do nových. **Přitom pohledem zkontrolujte čistotu hadiček, které se zasouvají do reagentů, nejsou-li znečištěny plísni. Případná plíseň, by mohla znečistit nové reagenty a mohlo by dojít k jejich kontaminaci a znehodnocení.** Jsou-li hadičky znečištěné, omyjte je vodou. Hadičky od reagentů připojte zpět ke stroji. Konektory i hadičky jsou kvůli správnosti propojení barevně značeny.
12. Stiskem tlačítka „OK“ potvrdíte instalaci nových reagentů. Stiskem tlačítka „Zrušit“ by nedošlo k vynulování čítačů reagentů. Tuto variantu použijte, neprovádíte-li bělicí čištění při výměně reagentů, ale z důvodu špinavého analyzátoru.
13. Stiskem tlačítka „Zpět“ se vrátíte do předchozího menu údržba. Zde pokračujte stiskem tlačítka „Stav reagentů“. Stiskem tlačítka „Plnit všechny“ zahájíte napuštění analyzátoru a hadiček reagenty.
14. Bělicí čištění je dokončeno. Vraťte se na úvodní obrazovku a zde můžete začít analyzovat vzorek. **Je-li to třeba, tak stiskem tlačítka „Vynulování“ vedle položky Odpad vynulujete počítadlo odpadu.**

Poznámka: V případě, že je změněno umístění reagentů, je třeba provést kalibraci senzorů reagentů. Kalibrace senzorů zlepšuje využitelnost reagentů. V nabídce stav reagentů stiskem tlačítka „Kalibrace snímačů“ zahájíte kalibraci senzorů reagentů.

