


ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ TAMPÓN S ISOPROPYLALKOHOLEM

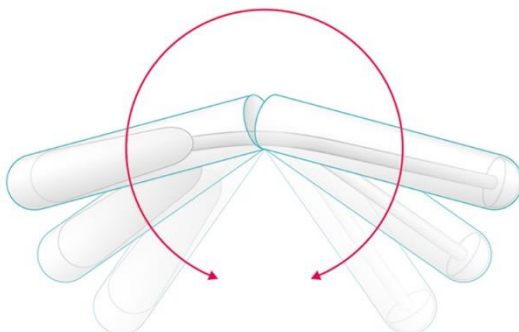

Zlomte tubu uprostřed v místě označení, očištěte menší ránu nebo kůži a čekejte 3 - 5 minut.

OBSAH BALENÍ

70 % isopropylalkohol.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě a chráňte před světlem.

APLIKACE

- Ošetření menší rány.
- Očištění a desinfekce před injekcí, infuzí nebo transfuzí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Tento výrobek je určen na jednorázové použití, nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo otevřený.
2. Uvědomte si, že tyčku s tampónem, by nebylo možné vytáhnout ven, pokud nebude rozlomena tuba.
3. Desinfekční tampón nelze použít do úst. Děti mohou zacházet s tampóny pouze pod dohledem rodičů.
4. Pokud nelze použít tampón nepřerušovaně z důvodu, že se objeví jakékoliv kožní příznaky, jako jsou (zčervenání alergie, otok, bolest, zánět) je třeba vždy požádat lékaře o radu.
5. Tampón by se neměl používat v čistě sterilním prostředí, jako jsou aseptické operační sály.
6. Místo aplikace by nemělo být omyto vodou dříve, než za 15 minut. Pokud došlo k náhodné kontaminaci oka, nahlaste to neprodleně lékaři.

PLATNOST POUŽITÍ

2 roky.



Výrobce: Longood Medicine (Beijing) Co., Ltd., No. 13, Yunteng Road, Economic Development Zone, Miyun County, 101500 Beijing, China

Zplnomocněný zástupce EU: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Distribuuje: inlab medical s.r.o. ČSN EN ISO 9001:2001, Kubelíkova 1779/23, 130 00, Praha 3-Žižkov, Telefon/Fax: (+420) 222721023, 222721025, 222721032, e-mail: inlab@inlab.cz

www.inlab.cz