



Veterinární biochemický analyzátor

Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy

Nad obrazovkou: Home

Na obrazovce: ANALYZE (analyzovat)

Stiskněte 2x za sebou ikonu ruky vpravo dole

Nad obrazovkou: Analyzer Setting (Nastavení analyzátoru)

Na obrazovce: soubor ikon

Stiskněte prostřední ikonu v horní řadě: graf

Nad obrazovkou: Include Reference Ranges (včetně referenčních rozmezí)

LAST MODIFIED:	poslední modifikace:
Alb	albuminu

Stiskněte ALL (všechny modifikace)

Nad obrazovkou: Modify Reference Range (úprava referenčního rozmezí)

Na obrazovce:

Analyte	Analyt
----------------	--------

Stiskněte Species (druh)

Nad obrazovkou: Species (druh)

Na obrazovce:

Stiskněte:

Add species	přidejte druh zvířete
Remove species	odeberte druh
Factory Default Species	návrat k původnímu nastavení
Cat	kočka
Dog	pes

Nad obrazovkou: Add species (přidejte zvířecí druh)

Na obrazovce:

Species 1	druh 1
Control 1	kontrola 1

Stiskněte Select (vybrat)

Nad obrazovkou: Species available (požadovaný druh)

Na obrazovce:

Canines	šelmy psovité
Felines	šelmy kočkovité
Equines	koně
Bovine	hovězí dobytek
Avians	ptáci

Stiskněte šipku vpravo dole: pokračuje nabídkou zvířecích druhů

Avians	ptáci
Reptilians /	plazi /
Amphibians	obojživelníci
Small mammals	drobní savci
Large mammals	velcí savci

Stisknutím na příslušný druh se rozšíří výběr na podskupiny či plemena.

Stisk Canines (šelmy psovité)

Coyote	kojot
Dingo	Dingo
Fox	liška
Jackal	šakal
Wolf	vlk

Stisk Felines (šelmy kočkovité)

Bobcat	rys
Cheetah	gepard
Jaguar	jaguár
Leopard	leopard
Lion	lev

Stiskněte šipku vpravo dole pro pokračování

Lion	lev
Lynx	rys
Panther	panter
Puma	puma
Tiger	tygr

Stiskněte Equines (koně)

Donkey	osel
Ponny	poník
Zebra	zebra

Stiskněte Bovines (hovězí dobytek)

Cow	kráva
Water Buffalo	vodní buvol
Steer	býk
Ox	vůl
Bull	býk

Stiskněte šípku vpravo dole pro pokračování:

Bull	býk
Buffalo	buvol
Bizon	bizon

Stiskněte Avians (ptáci)

Birds	ptáci
African Gray	papoušek šedý - Žako
Amazon	Amazoňan
Chicken	kuře
Cockatiel	Korela chocholatá
Cockatoo	Kakadu
Conure	Aratinga, Pyrury, Nandej
Dove	holubice (smuteční)
Duck	kachna
Flamengo	plameňák
Goose	husa
Love bird	Agapornis
Macaw	Ara
Mynah	Majna - Loskuták
Ostrich	pštros
Parakeet	Alexandr, Tirika, Mnišek
Parrot	druh papouška
Toucan	tukan
Lorys	Lori, Charmozin, Vini

Stiskněte Reptile / Amphibiens (plazi / obojživelníci)

Reptile	plazi
Aligator	Aligátor
Amphibian	obojživelníci
Bearded Drogon	ještěrka
Boa constrictor	hroznýš
Chameleon	chameleón
Crocodil	krokodýl
Frog	žába
Gecko	Gekon
Iguana	leguán
Lizard	druh ještěrky
Monitor	varan
Python	krajta
Salamander	salamandr
Snake	druh hada
Toad	ropucha
Tortoise	želva (Testudinidae)
Turtle	želva

Stiskněte Small mammals (drobní savci)

Small mammals	drobní savci
Bat	netopýr
Chinchila	činčila
Ferret	fretka
Gergil	pískomil
Guinea Pig	morče
Hamster	křeček
Hedgehog	ježek
Lemur	lemur
Mink	norek
Mouse	myš
Opposum	vačice
Praerie Dog	pes préríjní
Rabbit	králík
Raccom	mýval
Rat	krysa
Skunk	skunk
Squirrel	veverka

Stiskněte Large mammals (velcí savci)

Large mammals	velcí savci
Antelope	antilopa
Ape	opice
Baboon	pavián
Bear	medvěd
Camel	velbloud
Chimpanzee	šimpanz
Deer	jelen
Elephant	slon
Giraffe	žirafa
Goat	koza
Kangaroo	klokan
Llama	lama
Money	opice
Pig	prase
Sea Lion	Lev pouštní
Seal	mrož
Sheep	ovce

ZKRÁCENÝ ALGORITMUS

- Stiskněte za sebou:
- 2 x ikona ruky
- Graf (2. obrázek uprostřed 1. řady)
- ALL
- SPECIES
- ADD Species
- SELECT